



Comparer deux courbes tonales

Février 2022

Dans iAudiogram,

Il est possible de comparer deux courbes en audiométrie tonale

Etape 1



Afin de réaliser la comparaison de deux courbes d'audiométrie tonale,

- *Sélectionnez* le patient pour lequel vous souhaitez comparer les courbes
- *Ouvrir* l'audiométrie tonale de votre choix, à l'aide de l'icône « carré » à droite la ligne.

WALLAERT LAUREN	33	moyenne II
WANONO ruben	34	moyenne I

+ AJOUTER

  Audiométrie tonale | 14:50:37

Dans **iAudiogram**,

Il est possible de comparer deux courbes en audiométrie tonale

Etape 2

Sur l'interface audiométrique tonale de votre patient:

- *Cliquez sur l'onglet Courbes* en bas à gauche: vous apercevrez les dates des audiométries réalisées
- *Sélectionner* la date de l'audiométrie que vous souhaitez visualiser, ainsi que les courbes souhaitées.



Notes

Examens en cours

01/03/2022

Audiométrie : 23:21:38


- Droite BC
- Gauche BC

Dans iAudiogram,

Il est possible de comparer deux courbes en audiométrie tonale

Etape 3

L'audiométrie de la session active s'affiche en respectant les **couleurs** dictée par la convention internationale, l'audiométrie utilisée pour comparaison apparaît en filigrane en gris.

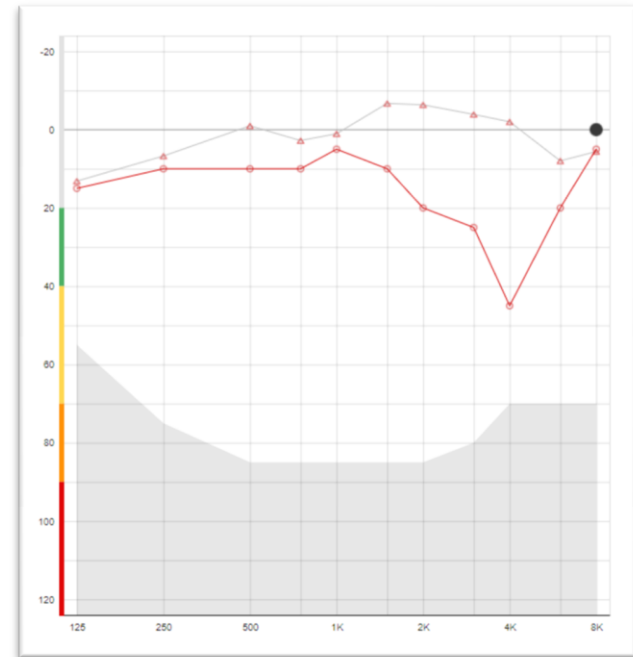



iAudiogram

Pour tout renseignement, nous restons à votre écoute



+33 3 26 47 92 46



support@iaudiogram.com