



iAudiogram

Créer un compte- rendu personnalisé

Février 2022

Dans iAudiogram,

Il est possible de créer un compte rendu personnalisé pour vos patients

Etape 1

Afin de réaliser un compte rendu personnalisé pour vos patients:

- *Sélectionnez* le patient pour lequel vous souhaitez réaliser le compte rendu
- *Cliquez* sur l'icône « compte-rendu ». L'interface permettant de réaliser les comptes rendus s'ouvrira

Nom	Age	Perte
MAXIME DUPONT	12	normale
WALLAERT NICOLAS	31	moyenne l

Mr. MAXIME Dupont
(01/01/2010 , 12 ans)

	PTA CA	PTA CO	IA
Droite	20 dB	- dB	- %
Gauche	23 dB	- dB	- %



Dans iAudiogram,

Il est possible de créer un compte rendu personnalisé pour vos patients

Etape 2

Sur l'interface Compte Rendu, vous pouvez remplir:

- Le nom de vos correspondants
- Les formules de politesses
- Le modèle de compte-rendu souhaité
- Les informations complémentaires nécessaires pour le CR sélectionné



The screenshot shows the 'Compte Rendu' (Report) form. It includes the following fields and options:

- Médecin traitant:** Emmanuel Leroux
- Copie:** Nicolas WALLAERT
- Modèle de Compte Rendu:** (dropdown menu)
- Formule de politesse début:** Cher Docteur
- Formule de politesse fin:** Bien à vous
- Durée d'utilisation:** 0
- Côté de l'appareil:** Unilatéral
- Description des difficultés auditives de la personne:** (text area)
- TELECHARGER LE RAPPORT:** (green button)

Dans iAudiogram, Il est possible de créer un compte rendu personnalisé pour vos patients

Etape 3

- Vous pouvez ensuite *télécharger* votre rapport sous format Word dans le dossier de votre choix

TÉLÉCHARGER LE RAPPORT

- Il est modifiable si vous souhaitez le personnaliser



Auditis
le sens de l'écoute

CENTRE D'AUDITION AUDITIS REIMS 5 bis capis Anatole France contact@ampifon.com 03 26 04 31 74	AUDIOPROTHESISTE Nicolas WALLAERT MEDECIN ORL Alain COSTEL
--	---

Le 09 mars 2022,

Réf Patient : PIERRE CHRISTOPH, né le 19/10/1952.

Cher Docteur,

Je vous ce jour votre patient, PIERRE CHRISTOPH, dans le cadre du suivi de son équipement et qui bénéficie d'un appareillage auditif.

Il a donc été réalisé ce jour un bilan audio prothétique complet afin de s'assurer de la continuité des résultats obtenus et de l'intégrité technique de l'équipement.

À ce jour, l'équipement est porté dans les conditions de vie courante à raison de 0h par jour, le patient décrit une perte de performance.

Le bilan audio prothétique ne révèle pas d'évolution significative de son audition pouvant expliquer cette détérioration de l'efficacité. Le passage en chaîne de mesure de l'appareillage met en avant des dysfonctionnements majeurs et les écarts constatés sur certains aspects sortent de l'intervalle de tolérance de la norme ANSI et de la nomenclature.

Dt

Certains de ses dysfonctionnements sont également observables à l'écoute subjective de l'appareillage. L'équipement ne répond plus aux exigences souhaitées. Étant hors garantie, nous orientons donc vers le renouvellement de ce dernier.

J'ai donc conseillé de vous consulter afin que vous puissiez établir un nouveau bilan otologique et fonctionnel permettant également d'assurer le suivi médical de son audition. Me tenant à votre entière disposition également pour toutes informations complémentaires.

Bien à **capis**.

Nicolas WALLAERT
Audioprothésiste D.F.



iAudiogram

Pour tout renseignement, nous restons à votre écoute



+33 3 26 47 92 46



support@iaudiogram.com