



iAudiogram

Réaliser une audiométrie vocale

Février 2022


Dans iAudiogram,

Il est possible de l'audiométrie vocale de vos patients

Etape 1

Afin de réaliser l'audiométrie vocale:

- *Sélectionnez* le patient dont vous souhaitez réaliser l'examen.
- *Cliquez* en dessous de sa fiche patient sur l'icône « Audiométrie vocale » (2^{ème} en partant de la gauche)

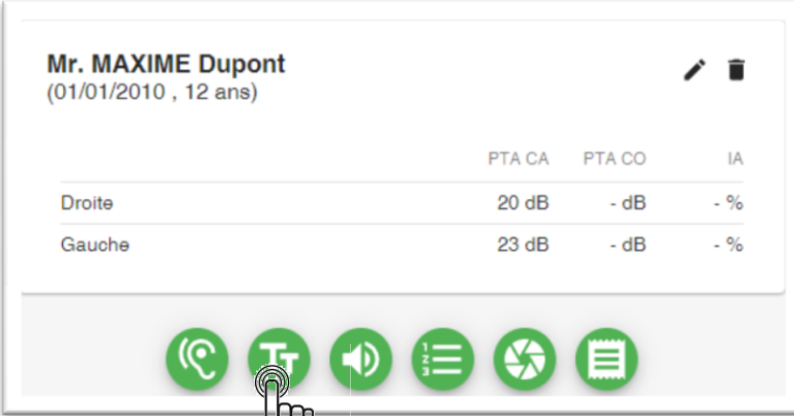

Mr. MAXIME Dupont
(01/01/2010 , 12 ans)

	PTA CA	PTA CO	IA
Droite	20 dB	- dB	- %
Gauche	23 dB	- dB	- %

Navigation bar icons: 1. Ear with sound waves, 2. **Tt** (Audiométrie vocale), 3. Speaker, 4. Menu, 5. Camera, 6. Document.

Dans iAudiogram, Il est possible de l'audiométrie vocale de vos patients

Etape 2

Dans l'interface d'« Audiométrie Vocale »,
vous pourrez:

- Choisir le type de test réalisé, le pas de mesure et la notation souhaitée

SDT	↻ Inversé
SRT	
MCL	↔ Couplé
UCL	
WRS	👤 Offset Vocale
± 5 dB	
2	
1	
± 5 %	Σ Lissage courbe
2	
1	

Dans iAudiogram,

Il est possible de l'audiométrie vocale de vos patients

Etape 3

Dans l'interface d'« Audiométrie Vocale »,
vous pourrez:

- Choisir l'oreille testée, le transducteur et les conditions expérimentales

Voie 1		Voie 2	
0 dB	< >	0 dB	< >
0 %	^ v	0 %	^ v
Signaux			
Actif		Actif	
Voie A		Voie A	
Voie B		Voie B	
Parole Bruitée		Parole Bruitée	
OVG		OVG	
Transducteur			
Conduction aérienne		Conduction aérienne	
Conduction osseuse		Conduction osseuse	
Champ libre		Champ libre	
Appareillage			
Non appareillé			
Appareillé			
Oreille(s)			
Droite		Droite	
Gauche		Gauche	
Binaural		Binaural	

Dans **iAudiogram**,

Il est possible de l'audiométrie vocale de vos patients

Etape 4



Dans l'interface d'« Audiométrie Vocale »,
vous pourrez:

- *Choisir* le matériel vocal utilisé



Phonème ▼ Cochléaire de Lafon ▼ Voix homme ▼ < Piste 1 ▼ >

Dans iAudiogram,

Il est possible de l'audiométrie vocale de vos patients

Etape 5

Lancer le test en cliquant sur l'icone « Play ».



- Appuyez sur la touche « entrée » si le mot est correctement répété par le patient f i de 13
- Sinon, écrivez le(s) numéro(s) du phonème erroné puis appuyez sur entrée

Une fois la liste terminée, « enregistrez » pour sauvegarder le score de la liste



Cliquez sur sauvegarder une fois l'examen terminé

SAUVEGARDER



iAudiogram

Pour tout renseignement, nous restons à votre écoute



+33 3 26 47 92 46



support@iaudiogram.com