



iAudiogram

Réaliser une vidéo-otoscopie

Février 2022


Dans iAudiogram,

il est possible de réaliser une vidéo-otoscopie des deux oreilles

Etape 1

Parmi la liste de vos patients, sélectionner le patient pour lequel vous allez réaliser la vidéo-otoscopie:

- Cliquez sur la quatrième icône à gauche sous la fiche de votre patient (icône otoscopie)

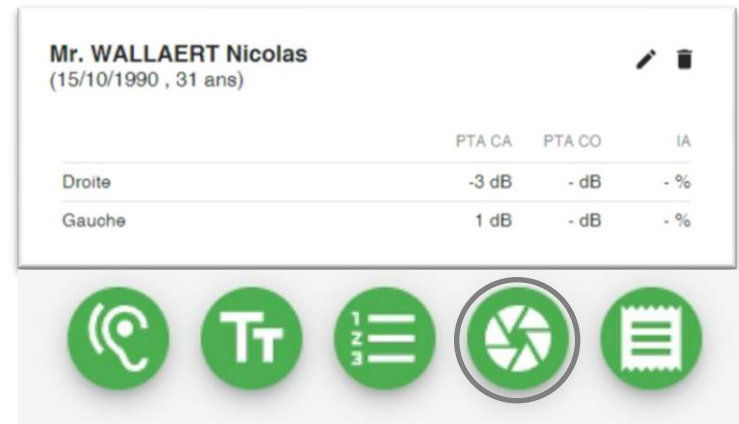

Mr. WALLAERT Nicolas
(15/10/1990 , 31 ans)

	PTA CA	PTA CO	IA
Droite	-3 dB	- dB	- %
Gauche	1 dB	- dB	- %


Navigation icons: Ear, Tt, 1 2 3, Otoscope (highlighted), Document.

Dans iAudiogram, il est possible de réaliser une vidéo-otoscopie des deux oreilles

Etape 2

La fenêtre vidéo-otoscopie s'ouvre alors. Vous pourrez ainsi:

- De *prendre en photo le coté*
 - gauche, en cliquant sur *capture à gauche*
 - droit, en cliquant sur *capture à droite*

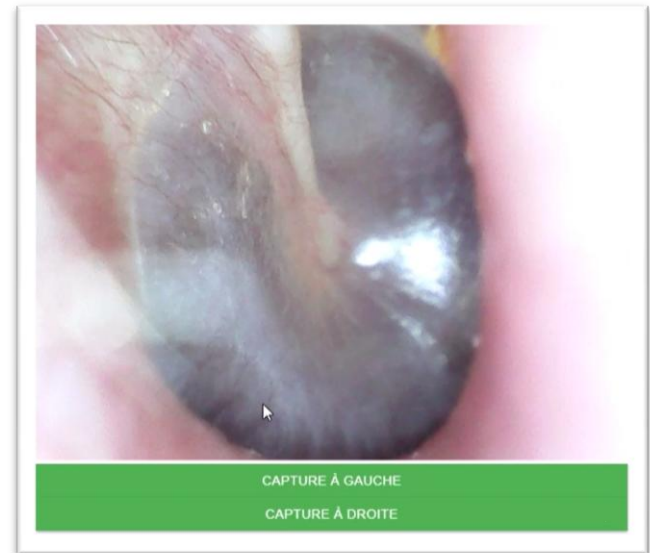


Dans iAudiogram,

il est possible de réaliser une vidéo-otoscopie des deux oreilles

Etape 3

- Une fois les photos prises, vous pouvez cliquer pour renseigner votre interprétation de l'otoscopie en cliquant sur la capture d'image concernée
- Cliquer sur *Enregistrer* afin de *sauvegarder vos données*

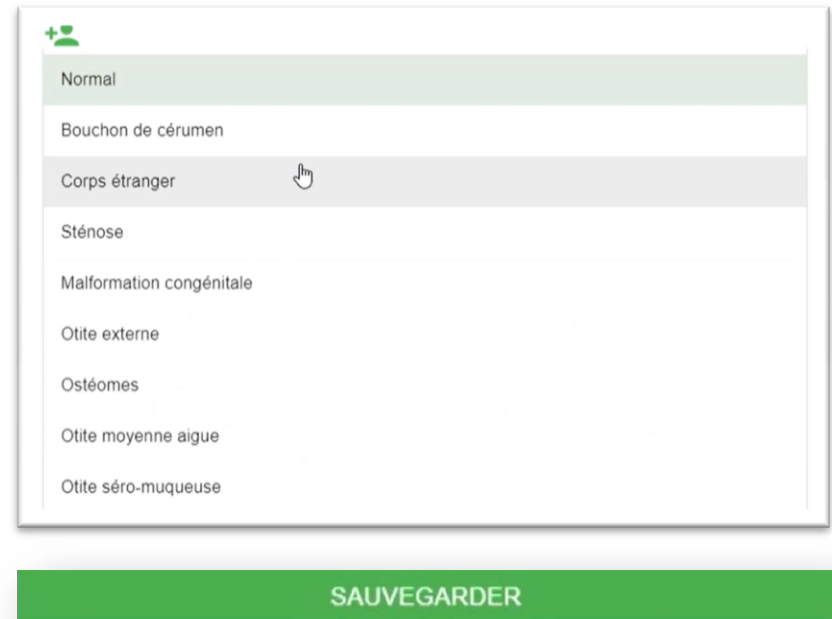

+

Normal

Bouchon de cérumen

Corps étranger

Sténose

Malformation congénitale

Otite externe

Ostéomes

Otite moyenne aigue

Otite séro-muqueuse

SAUVEGARDER



iAudiogram

Pour tout renseignement, nous restons à votre écoute



+33 3 26 47 92 46



support@iaudiogram.com